

WYRÓB MEDYCZNY

BLIZAN

HIPOALERGICZNY

ZEL SILIKONOWY NA BLIZNY

żel
15 ml
roll-on

żel
15 g

żel
50 g



wyróluj bliznę



Kategoria dostępności:
WYRÓB MEDYCZNY



Postać:
ŻEL SILIKONOWY



Wielkość opakowania:
15 ML, 15 G, 50 G

ARISTO

WYRÓB MEDYCZNY

BLIZAN

HIPOALERGICZNY

ZEL SILIKONOWY NA BLIZNY

żel
15 ml
roll-on

żel
15 g

żel
50 g

wyróluj
bliznę



Wskazanie do stosowania

Żel BLIZAN to hipoalergiczny, bezzapachowy, przezroczysty, szybko wysychający preparat, przeznaczony do leczenia blizn różnego pochodzenia:



pooperacyjnych

po operacjach
plastycznych
i chirurgicznych, po
zabiegach terapii
laserowej, po cesarskim
ciąciu



pooparzeniowych



pourazowych



rozstępowych

powstałych w wyniku:
cięży, zmian wagi lub
podczas okresów
szybkiego wzrostu w
procesie dojrzewania



potrądzikowych



WYRÓB MEDYCZNY

BLIZAN

HIPOALERGICZNY

ZEL SILIKONOWY NA BLIZNY

żel
15 ml
roll-on

żel
15 g

żel
50 g

wyróluj
bliznę



Wskazanie do stosowania

Żel BLIZAN można stosować na każdą świeżą bliznę tuż po zagojeniu się rany, jeśli skóra jest nieuszkodzona oraz na stare blizny.

Najlepsze efekty uzyskuje się podczas stosowania preparatu do 2 lat po wygojeniu rany.

Może być stosowany u dorosłych i dzieci.

WYRÓB MEDYCZNY

BLIZAN

HIPOALERGICZNY

ZEL SILIKONOWY NA BLIZNY

żel
15 ml
roll-on

żel
15 g

żel
50 g

wyróluj
bliznę



Mechanizm działania

JAK DZIAŁA ŻEL BLIZAN?



Żel silikonowy tworzy na powierzchni skóry cienką, nieprzepuszczalną dla wody membranę, utrzymując tym samym właściwą wilgotność skóry.

Zmiękcza, uelastycznia i wygładza bliznę, poprawiając jej wygląd, dzięki czemu blizna staje się mniej przebarwiona.

Redukuje świąd i uczucie napięcia.

WYRÓB MEDYCZNY

BLIZAN

HIPOALERGICZNY

ZEL SILIKONOWY NA BLIZNY

żel
15 ml
roll-on

żel
15 g

żel
50 g

wyróluj
bliznę



Skład



Mieszanka polisiloksanów.
Bez szkodliwych dodatków.

ARISTO

WYRÓB MEDYCZNY

BLIZAN

HIPOALERGICZNY

ZEL SILIKONOWY NA BLIZNY

żel
15 ml
roll-on

żel
15 g

żel
50 g

wyróluj
bliznę



Sposób użycia

JAK UŻYWAĆ ŻEL BLIZAN?

Zaleca się stosowanie żelu dwa razy dziennie.

Żel przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, na skórę.

Masaż wspomaga proces gojenia się blizn.

Na warstwę żelu, po jego wyschnięciu, można stosować kosmetyki.

ARISTO

WYRÓB MEDYCZNY

BLIZAN

HIPOALERGICZNY

ZEL SILIKONOWY NA BLIZNY

żel
15 ml
roll-on

żel
15 g

żel
50 g

wyróluj
bliznę



2 fazowa terapia

1 faza aplikacja silikonu

Według Scar Management Practical Guildness, produkty oparte na silikonie takie jak żele, to złoty standard w postępowaniu I rzutu zarówno dla profilaktyki jak i leczenia blizn.



2 faza masaż roll-on

Badania kliniczne dowodzą, że masaż dodatkowo zwiększa skuteczność i skracza czas terapii blizn i rozstępów. Terapia manualna stymuluje tworzenie się nowego naskórka, jego naturalne ułożenie i lepsze ukrwienie.

Literatura:

1. Meaume. S, Le Pillouer-Prost A, Richert B, Vadoud Eur J; Management of scars: updated practical guidelines and use of silicones.; Dermatol. 2014 Jul-Aug;24(4):435-43.
2. Sara Ud-Din, Sarah-louise McAnelly, Alison Bowring, Sigrid Whiteside, Julie Morris, Iskander Chaundhry, Ardeshr Bayat; University of Manchester Hospital; Archive of Dermatological Research, 2013, 305: 603-617.
3. Yoon Soo Cho, Jong Hyun Jeon, Aram Hong, Hyeong Tae Yang, Haejun Yim, Yong Suk Cho, Do-Hern Kim, Jun Hur, at all.; Burns: The effect of burn rehabilitation massage therapy on hypertrophic scar after burn: A randomized controlled trial; 2014 Dec;40(8):1513-20



WYRÓB MEDYCZNY

BLIZAN

HIPOALERGICZNY

ZEL SILIKONOWY NA BLIZNY

żel
15 ml
roll-on

żel
15 g

żel
50 g

wyróluj
bliznę



Wpigułce

- Jaki pacjent?**
- ▶ W trakcie rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych bądź urazach przeciw powstawaniu blizn
 - ▶ U nastolatków, u których powstają rozstępy na skutek okresu dojrzewania
 - ▶ U kobiet w ciąży i po ciąży profilaktycznie i terapeutycznie przeciw powstaniu rozstępów

Jak często? Dwa razy dziennie (rano i wieczorem).

Jak długo? Minimum 6 miesięcy

Gdzie? Miejscowo na bliznę lub rozstępy

Od kiedy? Brak ograniczeń wiekowych



ARISTO